




# Selbsttests für Schülerinnen und Schüler

Einfach, kurz und schmerzlos. Ergebnis in zirka 15 Minuten.

## Was wird gebraucht?



Testkarte

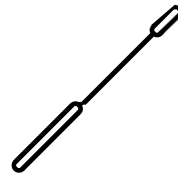

Stäbchen mit Watte (Tupfer)




Lösung

## So geht's:




**1.**

- Stäbchen aus der Hülle schieben, Watte nicht berühren;
- Mit der Watteseite ins Nasenloch stecken;
- Stäbchen 5 Mal im Kreis drehen. Stäbchen in das andere Nasenloch stecken und wieder 5 Mal im Kreis drehen.

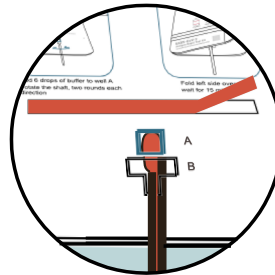


**2.**

- Schutz-Folie auf der Innenseite der Testkarte abziehen;
- Stäbchen mit der Watte-Seite in die Öffnung von B nach A schieben.

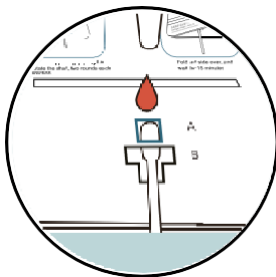

**3.**

- 6 Tropfen der Lösung auf die Watte geben
- Das Stäbchen 2 Mal drehen.

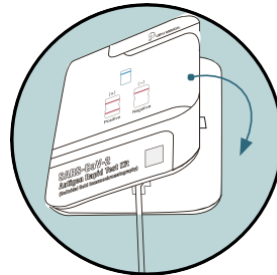

**4.**


- Seiten der Testkarte aufeinanderlegen
- Das Testergebnis erscheint in 15 Minuten.

## Testergebnis:

Positiv

Negativ

U n g ü l t i g

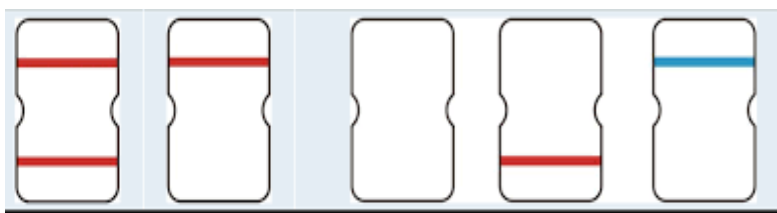

### • Testergebnis positiv:

Kind kommt in Quarantäne, Eltern machen einen Termin für einen PCR-Test unter Telefon 0421 - 361 10100 oder [Corona-Schule-Freitestung@bildung.bremen.de](mailto:Corona-Schule-Freitestung@bildung.bremen.de)

### • Testergebnis negativ:

Gesund bleiben und weiter die Schule besuchen